

Jährliches Wartungsprotokoll

Datum:
Kunde:
Kommission:
PLZ, Ort:
Modell:
Chassis-Nr.:
Bemerkungen: Die Fachhändler sind angehalten eine jährliche Wartung gemäss untenstehendem Protokoll durchzuführen. Geschätzte Dauer der Prüfung: ca. 90-120min

	Geprüft i.O.	Instandgestellt	Aktion notwendig	nicht relevant
Kontrollpunkt:				
Allgemein				
Polsterüberzug i.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrollstuhl auf lose Teile prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrgestell				
Räder: Reifenprofil überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Räder: Pneudruck überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Räder: Befestigungsschrauben überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federung: hinten und vorne überprüfen (Gängigkeit, keine Geräusche etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federung: bei Swiss Viva - die Federklammer an Hinterradschwinge überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federung: bei Swiss Viva - Gummipuffer an Hinterradschwinge überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federung: bei Swiss Viva Grand - O-Ringe (Anschlag) an Hinterradschwinge überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lenkgabelarretierung: Funktion inkl. Kontrollleuchte überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoarretierung: Funktion inkl. Kontrollleuchte (falls vorhanden) überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kippschutzrollen: Funktion überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stützrollen: bei Swiss Viva Grand S - Funktion überprüfen (wenn Stützrollen unten, Rollstuhl leicht angehoben -> grosse Lenkräder stützen aber noch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzteil				
Sitzneigung: Endlagen überprüfen, kollisionsfreies Abfahren bei max. Rückenneigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rückenneigung: Endlagen überprüfen, kollisionsfreies Abfahren bei max. Sitzneigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion Sitzlift überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Hub/Stehen - Geschwindigkeitsreduktion (Schildkröte im Display) aktiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberkörpersicherung überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armlehnen				
Armlehne zurückschwenkbar: Funktion überprüfen (evt. Gängigkeit/Hemmung einstellen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armlehne zurückschiebbar: Gängigkeit überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armlehne zurückschiebbar: Anschlag + Feststellschraube überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armlehnen steckbar: leichte Abnehmbarkeit überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armlehnen steckbar: Arretierung überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beinstützen / Fussplatten				
Fussplatten: Ausrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beinstützen: Auf Deformation überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fussplatten: Bleiben oben (evt. Hemmung nachjustieren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fussplatten: Keine Kollision mit Vorderrad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausschwenkbare Beinstützen: Funktion + Arretierung überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische Beinstützen: Funktion überprüfen (Spiel akzeptabel) ggf. nachjustieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische Beinstützen wegnehmbar: entfernen -> aufstecken -> Funktion überprüfen (el.Kontakt ok?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knieschliesser				
Knieschliesser: Funktion überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knieschliesser: leichte Abnehmbarkeit überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knieschliesser: Arretierung überprüfen -> Arretierung darf nicht aushängen können (Einlaufkurve nach unten drücken und überprüfen ob Arretierung nicht aushängt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Geprüft i. O.	Instandgestellt	Aktion notwendig	nicht relevant
Kontrollpunkt:				
Ladegerät				
Funktion überprüfen / Ladevorgang verifizieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ladekabel: Zugsicherung überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Während Ladevorgang ist der Fahrbetrieb gesperrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterien				
Batterieanschluss und Sicherungsanschluss mit Schraubenschlüssel überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteriespannung messen: Batterie 1VDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteriespannung messen: Batterie 2VDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Differenz Batteriespannungen Batterie 1/Batterie 2 maximal 0.05VDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polabdeckungen überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtungsstecker überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerung / Bedienpult				
Bedienpult/Steuergeräte: Abdeckungen, Gehäuse, Faltenbalg auf Risse kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienpulthalterung/Parallelführung: Anschlag vorhanden wenn nötig (Joystick darf keinesfalls durch Kollision mit z.B. Armlehne unbeabsichtigt ausgelenkt werden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienpulthalterung/Parallelführung: Gängigkeit und Kugelrasterung einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkabelung				
PM-, ISM-, Bus- und Zubehör-Stecker auf Sitz und lose Litzen überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klemmenleisten-Stecker und Litzen auf Sitz und lose Litzen überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antriebsmotoren				
Bremsauslösung (Blockierung, wenn eingerastet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechanische Auslösung (keine Fahrfunktion, wenn ausgerastet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keine auffallenden Geräusche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung				
Funktionskontrolle (Scheinwerfer, Blinker, Warnblinker)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung wird von keinen Bauteilen verdeckt -> Funktion gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrttest				
Geradeausfahrt ohne Ziehen nach links oder rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn Joystick nach Geradeausfahrt losgelassen wird -> kein Ziehen nach links oder rechts während Bremsvorgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausführen sämtlicher Steuerbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteriestandsanzeige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsweg nach max. Geschwindigkeit in Ebene beurteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schnelle Kurvenwechsel - Verhalten beurteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auf Rampe: Bremsen halten den Rollstuhl inkl. Fahrer beim Anfahren (leichtes Rückrollen ist akzeptabel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allfälliges Zubehör				
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optische Kontrolle				
Abschlussdeckel alle montiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diverses				
Endreinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name

Visum

Datum/Uhrzeit